

機械器具 12 理学診療用器具  
一般 弹性ストッキング (JMDNコード: 31724000)  
医療機器届出番号 10B3X10003000001

# ASICAL BAND

## アシカルバンド

### 取扱説明書

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、商品の特性を充分に理解してからご使用下さい。常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読み下さい。

お問合せ先



03-3863-4960

土・日・祝日を除く10:00~17:00

製造販売業者：株式会社アイリス

住 所：群馬県太田市新田上中町18-5

製 造 業 者：竹中織維株式会社

住 所：石川県かほく市高松才46-4、46-5、47-1

## 【使用上のご注意】

1. 重度の血行障害のある方は使用しないでください。
2. 次の方は着用前に医師にご相談ください。
  - 1) 糖尿病、深部静脈血栓症、血行障害、うつ血性心不全、炎症性疾患、装着部位の神経障害などで治療を受けている方。
  - 2) 現在、病気やけがなどによる脚のむくみやだるさを感じる方。
  - 3) 血圧が高い方で治療を受けている方、心臓・腎臓などに障害のある方で治療を受けている方。
3. 使用にあたり、次のことに注意してください。
  - 1) 就寝時の使用はしないでください。
  - 2) 水の中での使用はしないでください。
  - 3) プールや大浴場の排水口付近などでは、本品が引き込まれたり、絡まつたりする恐れがあるため使用しないでください。
- 4) 本品を着用してスポーツ、運転、自転車などの乗り物に乗る時をはじめ、本品が引き込まれたり絡まつたりする恐れのある場所では、危険防止のため本品を着用した上からソックスやレギンスなどで必ずカバーして使用してください。
4. 気分が悪くなったり、痛みやしづれなどの不快感、かゆみ、発疹等異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

## 【形状、構造及び原理等】

### 1. 概要

本品は、種々の加工法により編成された包帯状の弾性ストッキングである。糸の弾力により圧迫力を加える生地の構造と、装着時における生地の伸長率又は重ね方によって装着する各部位への圧迫力が調節可能なことにより、末梢から中枢にかけて均一的に圧迫を加える機能及び、末梢から中枢にかけて漸減的に圧迫を加える機能を有する。

### 2. 組成・サイズ

- 1) 混用率：83% ナイロン 17%ポリウレタン
- 2) サイズ：巾 80mm 厚み 0.9mm 長さ 1.75m

## 【保守・点検に係る事項】

本品は伸縮性に富んでいるため、商品により長さ（置き寸法）に若干の差が生じることがあります。機能には影響ありませんのでご安心下さい。

## 【基本的な注意事項】

- 1) 解説書に記載の方法、使用目的以外の方法で使用しないで下さい。  
本来の使用方法・目的以外での使用については一切の責任を負いかねます。
- 2) 子供の手の届くところに置かないで下さい。
- 3) 本品を細く折りたたんだり、ひも状にして使用しないで下さい。
- 4) 使いはじめは、自身のお肌の様子に注意しながら、30分程度の短時間から様子を見て徐々に使用時間を長くしていくようにして下さい。
- 5) 強く巻きすぎると血行を妨げる恐れがありますのでご注意ください。
- 6) 本品が着用中にたるんだり、しわが寄ったり、ずり落ちたりしている場合は正しく着用しなおして下さい。
- 7) 本品は繊維製品のため、伸びた爪や荒れた指先での取り扱い、指輪などのアクセサリー類や鋭利なものとの接触により、破損することがありますのでご注意下さい。
- 8) 本品をハサミで切るなどして加工・改造・修理するのはお止め下さい。
- 9) 繊維の劣化を避けるため、薬品や油脂類、溶剤類が付着しないようご注意下さい。
- 10) ズボンや厚手のソックス類を着衣した上から巻くと、衣服の素材や形状によっては、皮膚に負担を与えることがありますのでご注意下さい。
- 11) 他の着圧性能製品との併用はお止め下さい。

## 【使用目的・効果又は效能】

下肢の静脈血、リンパ液のうつ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弹性ストッキングである。効果効能は、脚のむくみの改善・脚の疲れの軽減・血行の促進・リンパ液の流れの改善である。

## 【品目仕様等】

本品使用時の生地の着圧レベルをエアーバッグ方式で測定した際、下記の数値となる。

1.2倍伸長時 26 mmHg (35 hPa)

1.5倍伸長時 38 mmHg (51 hPa)

1.8倍伸長時 43 mmHg (57 hPa)

測定法：エアーバッグ方式

測定器：A M I テクノ A0905-SA-SET

備考 生地を2重に重ねた状態で測定

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 直射日光の当たる場所、温度差の激しい場所、高温多湿な場所、火気の側には置かないで下さい。
- 汗が付着したまま、汚れたままで本品を保管しないで下さい。

## 【取扱い上の注意】

- 洗濯する際は中性洗剤を使用し、手洗いまたはネットに入れて下さい。
- 強くこすると本品を傷める恐れがあります。
- 本品のお手入れの際に、シンナー、ベンジン、アルコール、酸性洗剤、蛍光増白剤の入った洗剤、漂白剤などは使用しないで下さい。
- 洗剤液に長く浸けたままにしたり、濡れた状態または水中で長時間放置しないで下さい。
- タングラー乾燥はお避け下さい。
- お風呂の残り湯で洗濯される場合、入浴剤の投入量や含まれる成分の影響により、染料が他の衣類などに移る可能性があります。
- 洗濯が終わったら出来るだけ早く取り出し、ハンガーや物干し竿に吊るして陰干しして下さい。
- 本品を濡れたまま他の衣類やタオルなどと重ねて放置しないで下さい。
- 吊るし干しの場合、徐々に水がしだり落ちてくる場合があります。床が濡れないよう、タオルや新聞紙などを敷いて下さい。
- アイロンをかける場合は当て布をして、アイロン温度120℃を上限として下さい。
- 長時間の重ね置きやたたんだ状態を続けると、本品が傷む場合があります。
- 取扱い絵表示



※洗濯ネット使用してください

※あて布使用してください

## 【保証規定】

保証期間内の製品については、本規定が適用されますので必ずお読み下さい。

1. 取扱説明書、解説書および販売店からお伝えする正しい使用状態のもとで、万一発生した着圧性能の劣化については保証期間中、無償で交換いたします。
2. 保証期間は使用開始時期、使用期間、保証交換後に関わらず、お買い上げ日から1年間です。
3. 本保証書は日本国内での使用に限り有効です。
4. 付属品（携帯用バンド、パッケージなど）は含まれません。
5. 保証期間中でも以下の場合は、無償保証の適用を受けることが出来ません。
  - 1) 保証対象となる商品がない場合
  - 2) 保証書の提示および添付がない場合
  - 3) 保証書の必要事項（ご住所、お名前、お買い上げ店名、お買い上げ年月日など）が未記入の場合、あるいは店名が押印（またはそれに代わるもののが貼り付け）されていない場合
  - 4) 字句を無断で改ざんされている場合
  - 5) 取扱説明書、解説書および販売店からお伝えする使用方法と異なるお取り扱いによって生じた場合
  - 6) お買い上げ後の輸送・移動時の管理や保管上の不備により生じた場合
  - 7) 製品表面の毛玉、毛羽立ち、色あせなど、着圧性能の劣化に属さない外観の変化
  - 8) 火災、地震、風水害、その他天変地異などに起因する場合
  - 9) 上記に掲げる場合の他、劣化の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合
6. 個人情報の取り扱いについて  
お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や、保証交換およびその関連などにご利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

# 保証書

この商品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格したものです。

取扱説明書、解説書および販売店でお伝えする使用方法に従ったお客様の正しい使用状態で万一着圧性能の劣化が発生した場合は、本書に記載された保証規定により交換いたします。

- ※ お買い上げ店の店名が押印され、お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめの上お受け取り下さい。
- ※ この保証書は再発行いたしませんので、お客様のお名前、ご住所および電話番号をお客様が保証書にご記入の上、大切に保管して下さい。

ご住所

お名前

電話番号

お買い上げ店名

お買い上げ年月日

年           月           日